

GRAM Fuchsin	GRAM Fuchsin
CONCENTRATE SS-141AF	KONZENTRAT SS-141AF
For in vitro diagnostic use with the Aerospray <sup>®</sup> slide Stainer for Gram staining.	In Vitro Diagnostikum für den Aerospray <sup>®</sup> Färbeautomat zum Gram- Färben:
DIRECTIONS: Add entire contents to 3.6 liters anhydrous isopropanol blended with 0.9 liters anhydrous acetone. <b>See instruction sheet.</b>	Anleitung: Den gesamten Inhalt zu 3,6 Litern mit 0,9 Litern wasserfreiem Aceton vermischem wasserfreiem Isopropanol geben. <b>Siehe Arbeitsanleitung.</b>
WARNING: TOXIC, IRRITANT, SUSPECTED CARCINOGEN, DO NOT FREEZE Store at room temperature away from direct sunlight. Do not puncture package-contents will stain.	WARNUNG: GIFTIG, REIZSTOFF, STEHT IM VERDACHT KREBS ZU ERREGEN, NICHT EINFRIEREN. Bei Zimmertemperatur ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Packung nicht beschädigen – Inhalt färbt.
CONTENTS (135 mL): propylene glycol, water, imidazole, benzyl alcohol, and basic fuchsin.	INHALTSSTOFFE (135 ML): Propylenglykol, Wasser, Imidazol, Benzylalkohol und basisches Fuchsin.