

GRAM Safranin	GRAM Safranin
CONCENTRATE SS-141A	KONZENTRAT SS-141A
For in vitro diagnostic use with the Aerospray [®] slide Stainer for Gram staining.	In Vitro Diagnostikum für den Aerospray [®] Färbeautomat zum Gram-Färben.
DIRECTIONS: Add entire contents to 3.6 liters anhydrous isopropanol blended with 0.9 liters anhydrous acetone. See instruction sheet.	ANLEITUNG: Den gesamten Inhalt zu 3,6 L mit 0,9 L wasserfreiem Aceton vermischem wasserfreiem Isopropanol geben. Siehe Arbeitsanleitung.
WARNING: TOXIC, IRRITANT, DO NOT FREEZE Store at room temperature away from direct sunlight. Do not puncture package-contents will stain.	WARNUNG: GIFTIG, REIZSTOFF, NICHT EINFRIEREN Bei Zimmertemperatur ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Packung nicht beschädigen – Inhalt färbt.
CONTENTS: (210 mL): Propylene glycol, water, imidazole, benzyl alcohol, and safranin O.	INHALTSSTOFFE (210 ML): Propylenglykol, Wasser, Imidazol, Benzylalkohol und Safranin O.