

PILOGEL Discs for NANODUCT	PILOGEL-Scheiben für NANODUCT
For Iontophoresis with the Nanoduct Neonatal Sweat Analysis System	Zur Ionotophorese mit dem NANODUCT Neonatalen Schweißanalyse-System
Refrigerate, Do Not Freeze! Poison-External Use Only!	Kühl lagern, nicht einfrieren! Gift – nur zur äußeren Anwendung!
Instructions for Use: 1. Inspect electrodes – clean surface if necessary. 2. Insert a PILOGEL disc into each electrode recess. Press each disc firmly into place all around its periphery to ensure uniform contact with the electrode. 3. REFER TO SYSTEM INSTRUCTION MANUAL FOR DETAILED PROCEDURE.	Gebrauchsanleitung: 1. Elektroden inspizieren – bei Bedarf die Oberfläche reinigen. 2. Eine PILOGEL Scheibe in jede Elektrodenvertiefung setzen. Die Scheiben ringsherum fest eindrücken, um einen einheitlichen Kontakt zur Elektrode zu gewährleisten. 3. FÜR DIE GENAUE VORGEHENSWEISE BITTE DAS SYSTEMHANDBUCH HINZUZIEHEN.
Contents: 12 gel discs containing Water, Glycerol, Agar, 1.5% Pilocarpine Nitrate, Trisodium Citrate, Methylparaben, and Propylparaben. U.S. Patent No. 4,383,529	Inhaltsstoffe: 12 Gelscheiben mit Wasser, Glycerin, Agar, 1,5% Pilocarpinnitrat, Trinatriumcitrat, Methylparaben und Propylparaben. U.S. Patent No. 4,383,529
Important Cautions: 1. Replace cap securely to prevent dehydration of discs. Discs that lose water will diminish in size. 2. PILOGEL discs that have been frozen or that are cracked must not be used. NOTE: The discs are interchangeable with respect to electrodes. Sweat stimulation occurs at the site of the positive (red) electrode. 3. DISCS INTENDED FOR SINGLE USE ONLY. Ø2	Wichtige Vorsichtsmaßnahmen: 1. Behälter wieder fest verschließen, um ein Austrocknen der Scheiben zu verhindern. Durch Wasserverlust werden die Scheiben kleiner. 2. Gefrorene bzw. aufgetaute oder rissige PILOGEL Scheiben dürfen nicht verwendet werden. HINWEIS: Die Scheiben sind hinsichtlich der Elektroden austauschbar. Schweißstimulierung findet an der positiven (roten) Elektrode statt. 3. SCHEIBEN SIND NUR ZUR EINMALIGEN VERWENDUNG VORGESEHEN.