

# PILOGEL® plattor för NANODUCT™

För jontofores tillsammans med  
Nanoduct Neonatal svettanalyssystem

**Förvaras i kylskåp. Får ej frysas!**  
**Giftig – Endast för externt bruk!**

## Användarinstruktioner

- 1 Inspektera elektroderna – rengör ytan om nödvändigt.
- 2 Sätt i en PILOGEL-platta i varje elektrodfördjupning. Tryck ordentligt fast plattan runt hela kanten för att säkerställa en fullständig kontakt med elektroden.
- 3 SE ANVÄNDARMANUALEN FÖR DETALJERADE ANVISNINGAR.

Wescor, Inc  
459 South Main Street  
Logan, Utah 84321 USA

**WESCOR®**

(Seia förbrukningsdag)  
Lot 1001

(SATS)  
Exp D

Innehåll:  
12 gelplattor innehållande vatten, glycerol, agar, 1.5% pikokatpinitrat, trimetiumcitrat, metylparaben och polyparaben. U.S. Patent No. 4,383,529

**Viktiga försiktighetsåtgärder:**  
1. Sätt på locket ordentligt på pilogelförret för att undvika att plattorna torkar ut. Plattor som torkar vatten krymper i storlek.  
2. PILOGEL-plattor som har varit utsatta för frost eller har sprickor skall inte användas. ANMÄRKNING: Plattorna passar till båda elektroderna. Skrivutskriften ska vara vid den positiva (röda) elektroden.  
3. PLATTORNA ÄR ENDAST AVSEDDA FÖR ENGÅNGSBRUK.



L335A91 (translated 2003)