

INSTRUCCIONES PARA UTILIZAR EL AEROSPRAY

1. No poner en marcha el aparato con una carga no equilibrada.
2. Colocar el rotor sobre una superficie plana para cerrar la tapa del mismo. No cerrar la tapa del rotor mientras este último se encuentre sobre el eje giratorio del motor.
3. Durante las pruebas de rendimiento de las boquillas, proteger el motor del líquido colocando un recipiente de plástico sobre el eje.
4. Si aparece una información extraña en la pantalla y/o se produce un funcionamiento errático, desconectar el aparato durante por lo menos 20 segundos para reinicializar el procesador. Si persisten los problemas, instalar un supresor de sobretensión transitoria como los de los ordenadores / un suministro eléctrico ininterrumpido.
5. No utilizar nunca el teñidor como un depósito de residuos líquidos. La garantía no cubre los problemas derivados de la anegación del motor.
6. Estar pendiente del líquido retenido en el cuenco. Si no está drenando adecuadamente, comprobar si el contenedor de residuos está lleno. Utilizar un limpiador de tubos para eliminar cualquier residuo que bloquee el tubo de drenaje del aparato.
7. No dejar que se sequen las bombas. Si una bomba se seca, se tendrá que cebar manualmente utilizando el instrumento de cebado suministrado en el kit de mantenimiento de la boquilla (jeringa).
8. Si la bomba hace ruido al funcionar (de roce y rechinar), significa que ha entrado aire en la bomba. Extraer el aire de la bomba realizando por lo menos tres cebados de 20 segundos (utilizando la función de evaluación del volumen) sin la boquilla, y repetir de nuevo con la boquilla en su sitio. El hecho de ir colocando y retirando el dedo de la boquilla mientras se pulsa el botón de cebado ayuda a extraer el aire de la bomba.
9. Después de utilizar el teñidor, limpiar el interior del cuenco con una toallita de papel. Utilizar alcohol si es necesario. Así, el Aerospray se verá nuevo durante más tiempo.
10. El resultado de la tinción de portaobjetos depende en gran medida del rendimiento de la boquilla. Realizar siempre el mantenimiento preventivo diario, semanal y mensual. Encontrará los gráficos de mantenimiento preventivo (PM) de los diferentes modelos en nuestra página web www.wescor.com.

Para acceder a las instrucciones completas sobre el uso y cuidado adecuados del teñidor, remitirse al manual del usuario. Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia adicional, por favor, no dude en llamar sin coste alguno a nuestro departamento de servicios / reparaciones al teléfono gratuito 800-453-2725

L375-01A