

PILOGEL SS-023
Discos

Para iontoforesis con todos los sistemas de obtención de sudor Webster (MACRODUCT®)

Refrigerar,
¡No congelar!
Veneno – ¡Únicamente Para el Uso Externo!

Contenido: 12 Discos de Gel, que contienen 0,5% Nitrato de pilocarpina, agar, metilparabeno y propilparabeno.
Número de patente de los EEUU – 4.383.529

WESCOR
Wescor, Inc
459 South Main Street
Logan, Utah 84321 EEUU

INSTRUCCIONES DE USO

1. Inspeccionar los electrodos – limpiar la superficie si es necesario.
2. Introducir un disco de PILOGEL® en los huecos de cada uno de los electrodos.
3. CONSULTAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL SISTEMA PARA OBTENER EL PROCEDIMIENTO DETALLADO

PRECAUCIONES IMPORTANTES

- . Volver a tapar bien para evitar la deshidratación de los discos. Cuando pierden agua, los discos disminuyen de tamaño.
- . Los discos de PILOGEL® que hayan sido congelados o que estén agrietados no se deben utilizar. NOTA: los discos son intercambiables en lo que se refiere a los electrodos. La estimulación sudorípara ocurre en el punto de adhesión del electrodo positivo (rojo)
- . Los discos son para un solo uso.

Aviso:

Los discos son un poco más grandes que el diámetro del hueco del electrodo para asegurar un buen ajuste. Al colocar el disco en el hueco del electrodo, apretar firmemente el disco en toda su periferia para asegurarse de que se produce un contacto uniforme con el electrodo de acero inoxidable.

EC – REP
MT Promedt Consulting
Eisenbahnstrasse 2

St. Ingbert, Alemania