

SS-023  
PILOGEL®  
Plattor

---

För jontofores med alla Webster (Macroduct®) svettuppsamlingssystem.

---

Kylförvaras,  
Får ej frysas!  
Giftig-Endast för externt bruk!

---

Xn Hälsoskadlig  
R20/22, S1/2, S25, S45

---

Innehåll: 12 gelplattor innehållande 0,5% pilokarpinnitrat, agar, metylparaben och propylparaben.  
U.S patentnummer 4 383 529  
PRINT-0156-01A

---

Wescor, Inc  
459 South Main Street  
Logan, Utah 84321 USA  
Exp  
LOT  
Lot

---

#### BRUKSANVISNING

1. Granska elektroderna – rengör om nödvändigt dess ytor.
2. Sätt i en Pilogelplatta i varje elektrodfördjupning.
3. SE ANVÄNDARMANUALEN FÖR DETALJERADE ANVISNINGAR.

#### VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Sätt tillbaka korken ordentligt för att undvika uttorkning av plattorna. Plattor som förlorar vatten krymper i storlek.
- PILOGEL®-plattor som har varit utsatta för frost eller har sprickor skall inte användas. ANMÄRKNING: Plattorna är utbytbara mellan elektroderna. Svettstimulering sker där den positiva(röda) elektroden är fastsatt.
- Plattor är avsedda för engångsbruk.

#### Riskfraser

R20/22: Farligt vid inandning och vid förtäring

#### Skyddsfraser

S1/2: Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn

S25: Undvik kontakt med ögonen

S45: Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

#### Anmärkning:

Plattorna är något större än elektrodfördjupningens diameter för att säkerställa en tättsittande inpassning. Tryck ordentligt hela vägen längs plattans omkrets för att uppnå jämn kontakt med den rostfria elektroden.