

PILOGEL® Discs

SS-023IT

Per iontoforesi con tutti i Webster
(Macroduct®) Sistemi Raccolta Sudore

**Conservare in Frigorifero,
Non Congelare!
Veleno-Solo per Uso Esterno!**

Contenuto: 12 Dischi di gel, contengono
Pilocarpina Nitrato 0.5%, Methylparaben e
Propylparaben.

U.S. Patent No. 4,383,529

PRINT-0156-IT-01A

WESCOR®

Wescor, Inc
459 South Main Street
Logan, Utah 84321 USA



ISTRUZIONI PER L'USO

1. Ispezionare gli elettrodi-pulire se necessario
2. Inserire un disco di PILOGEL® dentro ogni elettrodo.
3. FARE RIFERIMENTO AL MANUALE ISTRUZIONI PER LE PROCEDURE DETTAGLIATE.

IMPORTANTI PRECAUZIONI

Richiudere il contenitore per prevenire la disidratazione dei dischi. I dischi che perdono acqua diminuiscono in sezione. I dischi di PILOGEL® a8 che hanno subito congelamento o sono rotti non devono essere utilizzati. **NOTA:** i dischi sono intercambiabili rispetto agli elettrodi. La stimolazione del sudore avviene all'elettrodo positivo (rosso). I dischi sono monouso.

Nota:

I dischi sono leggermente più 9d larghi del diametro degli elettrodi per assicurare un adattamento sicuro. Premere fermamente il disco dentro la sede e intorno al perimetro per assicurare un contatto uniforme con gli elettrodi di acciaio.