

PILOGEL®

SS-023G

Scheiben

Für die Iontophorese mit allen Webster
(Macroduct®) Schweißsammelsystemen

Kühl lagern! Vor Frost schützen!
Nur für äußerliche Anwendungen!

Xn gesundheitsschädlich
R20/22, S1/2, S25, S45



Inhalt: 12 Gelscheiben, enthalten 0,5%
Pilocarpinnitrat, Agar, Methylparaben und
Propylparaben.

U.S. Patent No. 4,383,529

PRINT-0157-01A



Wescor, Inc
459 South Main Street
Logan, Utah 84321 USA

Lot  P#####

Exp  mm/yyyy

Wichtig bei der Anwendung

Reinigen Sie, wenn nötig, die Elektrodenoberflächen. Beim Einlegen in die Elektroden, Scheiben unter vorsichtigem Druck drehen, damit der Kontakt mit den Elektroden gleichmäßig verteilt ist. Nach der Entnahme, Behälter wieder gut verschließen, damit kein Wasser verdunstet und die Scheiben schrumpfen. Verwenden Sie nie Pilogelscheiben, die eingefroren waren oder Risse zeigen. Die Pilogelscheiben sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Hinweise auf besondere Gefahren
R20/22: Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.
Sicherheitsratschläge
S1/2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S25: Berührung mit den Augen vermeiden.
S45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (dieses Etikett vorzeigen).

Beachten Sie:
Die Scheiben sind im Durchmesser etwas größer als die Elektroden, um einen festen Sitz zu gewährleisten.